


(BM's)
Balphin Medical's



CORTA YESOS 11CH

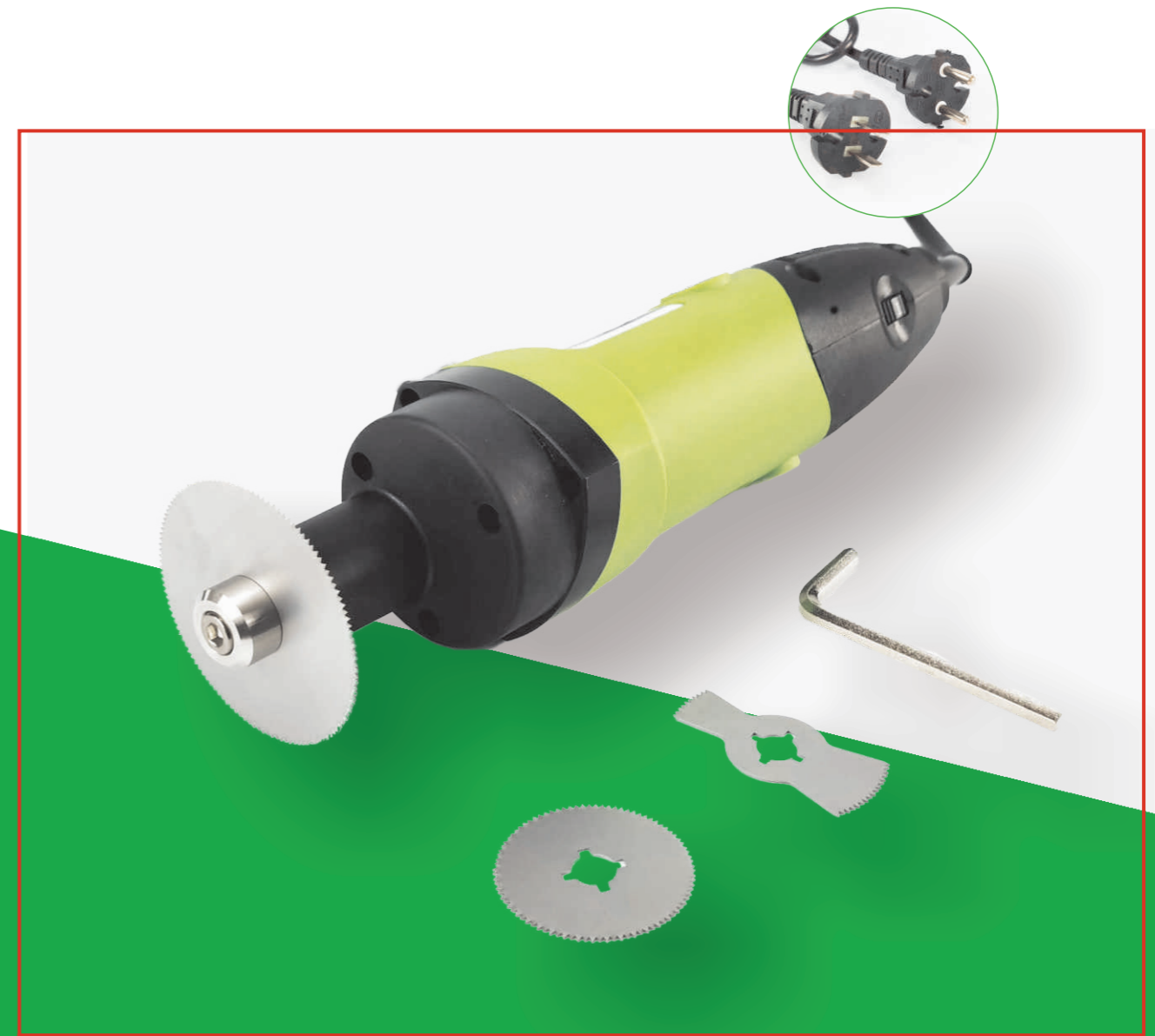

**La sierra médica para
yeso 11-CH está diseñada
para quitar todo tipo de
vendajes de yeso
ortopédicos, etc.**

» Imagen de producto



Llave de 6 velocidades



Configuración Standard



Equipo de corte

Llave Allen

Hoja de sierra redonda de 65 mm de diam

Hoja de sierra redonda de 42 mm de diam

Hoja de sierra universal

Maletin de transporte

» Especificaciones Técnicas

Pieza de mano	Voltaje de salida	80W
	Unit rise of temperature	≤25°C
	Output power	AC220V/50Hz or 110V/60Hz
Non-loading speed	0-13000cpm	
Non-loading noise	≤65dB (A)	

BM's
Balphin Medical's

» Instrucciones de operación



- 1. Retire la unidad principal, la llave Allen y las hojas de sierra de la caja.**
- 2. Utilice la llave allen para desenroscar el portacuchillas.**
- 3. Una vez que el portacuchillas esté suelto, retírelo de la unidad.**
- 4. Coloque la hoja elegida en el eje de transmisión.**
- 5. Apriete el portacuchillas nuevamente en la unidad.**
- 6. Asegure la hoja en su lugar usando la llave allen.**
- 7. La sierra ahora está ensamblada y lista para usar. Cuando termine, repetir estos pasos en orden inverso.**

» Instrucciones de seguridad

Antes de usar, revise la sierra para detectar posibles daños mecánicos.

Asegúrese de que la hoja de sierra no esté desafilada, no tenga dientes rotos y esté correctamente instalada.

Asegúrese de que la ventilación de aire del motor se mantenga limpia y libre de polvo para evitar el sobrecalentamiento que podría dañar el motor.

Durante el uso, no se esfuerce demasiado ni aplique presión cuando la hoja de la sierra esté en movimiento.

Si la cuchilla se atasca en el yeso, apague la unidad y retírela lentamente. Durante el uso, el motor se calentará; si la carcasa exterior se calienta excesivamente, apague el motor para evitar el sobrecalentamiento y permita que se enfríe.

Apague el motor si se produce algún ruido anormal o vibración excesiva durante el uso.

No encienda y apague la alimentación con frecuencia ya que esto dañará el motor.

Limpie la sierra después de su uso y guárdela en un lugar seco para evitar la corrosión.



» Mantenimiento y cuidado

Inspeccione todas las piezas a intervalos regulares y reemplace las hojas de sierra según sea necesario.

(BM's)
Balphin Medical's